


# Kurze Gebrauchsanweisung Bildbetrachter 3D Aucuitomo 170

Der USB-Stick enthält die Bilddaten einer Volumentomographie und Print Screens der wichtigsten Befunde.

- Öffnen Sie den Ordner mit einem Doppelklick.
- Aktivieren Sie den Viewer (OneVolumeViewer.exe).

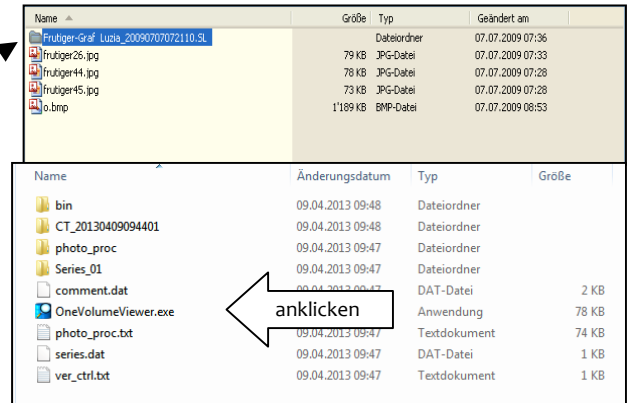

- Es erscheint ein Dialogfeld mit Warnhinweisen für den Benutzer. Klicken Sie OK.

Es kann einige Minuten dauern, bis die Daten angezeigt werden, je nach Leistung Ihres Computers und je nach Größe der Datei.

Führen Sie während des Einlesens von Volumendaten an Ihrem Computer keine anderen Aktionen durch.



- Dieses Fenster erscheint, sobald die Anwendung gestartet wird:

In der 3D-Ansicht werden die Schichten X, Y und Z sowie ein Volumen darstellungsbild angezeigt.

Sie können nun durch das ganze Volumen navigieren und Messungen vornehmen.

